
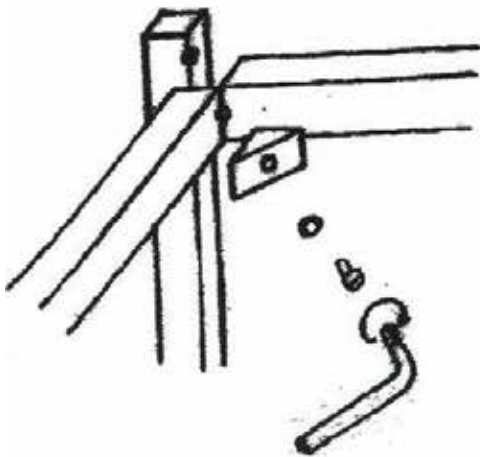


Montageanleitung & Pflegehinweise

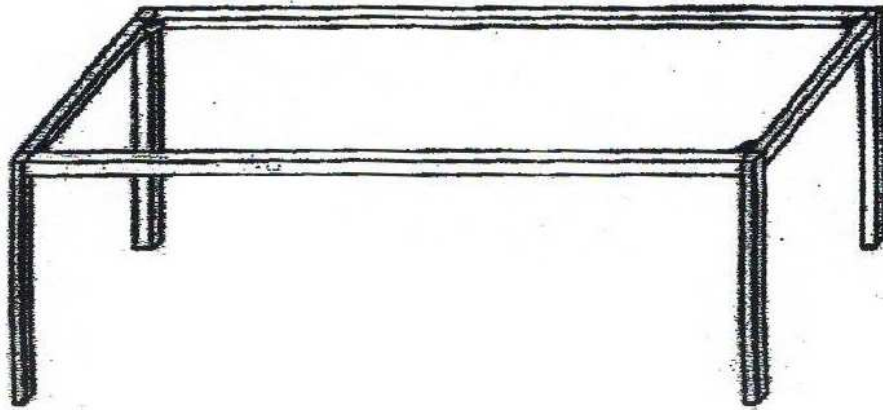

Schrauben **richtig**
Anziehen. Füße dürfen
nicht wackeln.

Allgemeine Pflege- und Nutzungshinweise

Kopfteil ist nicht zum Sitzen gedacht!
Die Liegen-Tragkraft von 220kg nicht überschreiten!
Liege nur tragend bewegen, nirgends anecken lassen
Zur normalen Reinigung reicht lauwarme Seifenlauge
aus.

Spezielle Reiniger:

Erst an **nicht sichtbarer** Stelle **testen!**

**Eine Liste möglicher Desinfektionsmittel ist
beigefügt**

Allgemeine Pflegehinweise:

Bitte vermeiden Sie es den Polsterteil an scharfen Ecken anstoßen zu lassen.

Reinigung und Desinfektion:

Generell reicht im Normalfall die Reinigung mit einer milden, warmen Seifenlauge aus.

Folgende Desinfektionsmittel sind zur Reinigung durch den Hersteller des Bezugstoffes (Fa. Hornschuh) getestet und empfohlen worden.

Dr. Schumacher GmbH	Cleanisept / Wipes	5%ig	
Dr. Schumacher GmbH	Optisept	7%ig	
Dr. Schumacher GmbH	Biguanid Fläche N	3%ig	
B.Braun Melsungen AG	Hexaquart lemon fresh	2%ig	
B.Braun Melsungen AG	Meliseptol foam pure		unverdünnt
B.Braun Melsungen AG	Meliseptol rapid		unverdünnt
Franken Chemie GmbH	Franco-Cid N	0,25%ig	
Franken Chemie GmbH	Dessan 2	0,25%ig	
Dürr Dental AG	FD 300	1%ig	
Dürr Dental AG	FD 366		unverdünnt
Schülke & Mayr GmbH	Antifect plus	0,5 %ig	
Schülke & Mayr GmbH	Buraton	3 %ig	
Aquagenius Schweiz GmbH	ASCEA-des		unverdünnt
Lysoform Dr.Hans Rosemann GmbH	Lysoformin Spezial	0,75%ig	
Lysoform Dr.Hans Rosemann GmbH	Aldasan 2000	4 %ig	
Desomed Dr. Trippen GmbH	Desomed rapid AF		unverdünnt
Tana Chemie GmbH	Apesin rapid	3 %ig	
BODE Chemie GmbH	Kohrsolin extra	4 %ig	
CosiMed	CosiMed	7,5%ig	

NICHT zu empfehlen sind ! :			
Schülke & Mayr GmbH	Perform	3 %ig	
BODE Chemie GmbH	Microbac forte	3 %ig	
Dürr Dental AG	FD 360		unverdünnt
Schülke & Mayr GmbH	Mikrozid sensitive liquid		unverdünnt
Ecolab GmbH	Incidin liquid		unverdünnt