


Montageanleitung SÖHNGEN® Wandklappliegen

Zur Montage der Wandklappvorrichtung gehen Sie bitte wie folgt vor:


- Stellen Sie die Liege an ihrem künftigen Platz auf (bitte achten Sie dabei auf ausreichende Wandstabilität!). Legen Sie nun die Richtung des Kopfendes fest (rechts oder links) und schieben Sie die Liege mit etwas Abstand an die Wand.
- Nehmen Sie die Wandhalterungen zur Hand. Der Sicherungshebel (A) und die drei Befestigungsbohrungen (B) müssen jeweils nach oben, der Drehzylinder (C) muß immer nach innen und unten gerichtet sein.
- Stecken Sie die Drehzylinder der Halterung rechts und links in den wandnahen Längsholm der Sanitätsliege. Kippen Sie die Wandhalterungen nach oben und schieben Sie gleichzeitig die Liege an die Wand.
- Stellen Sie sicher, daß die Beine der Liege ganz ausgeklappt, die Wandbefestigungswinkel richtig eingesetzt sind und gut an der Wand anliegen. Markieren Sie nun die erforderlichen Bohrungen durch die Lochmarkierungen (B) an der Wand.
- Bohren Sie die Dübellöcher an den Wandmarkierungen und stecken Sie die Dübel ein. Verschrauben Sie nun die auf den Liegerholmen aufgesteckten Wandhalterungen fest mit der Wand.

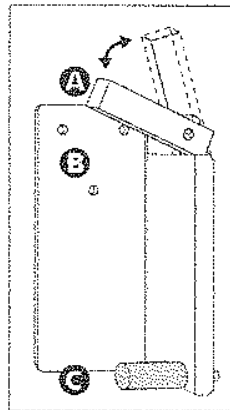

- jetzt kann die Sanitätsliege hochgeklappt werden. Legen Sie die Sicherungshebel der



beiden Wandhalterungen nach innen um und sichern Sie die Liegefläche. Kloppen Sie die Beine der Liege nach innen ein.

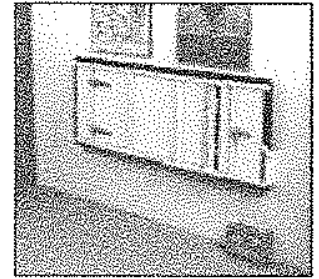

4. INSTANDHALTUNG

Ungeeignete Anwendung und mangelnde Kontrolle kann Schäden an Personen und Gegenständen verursachen.

Achtung: Ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden! Das Austauschen gebrochener oder abgenutzter Originalteile gegen Ersatzteile eines anderen Herstellers kann die Funktionalität der Liege beeinflussen und führt unvermeidlich zu Garantieverlust.

4.1 Kontrollen

Überprüfen Sie die Wandklappliegen vor Inbetriebnahme und vor jeder Nutzung auf sichtbare Schäden und Stabilität, sowie Funktionsfähigkeit der Verstellmöglichkeiten und der Wandklappfunktion. Überprüfen Sie auch den korrekten und festen Halt der Wandbefestigungswinkel.

Sollten Fehler auftreten, ist die Liege aus dem Betrieb zu nehmen und der Kundendienst zu kontaktieren.

4.2 Reinigungsempfehlung

Reinigung der Oberflächen mit feuchtem Schwamm mittels Wasser und Neutraseife, danach gründlich abspülen und trocknen. Keine aggressiven Mittel (Bleichmittel, Ammoniak usw.) verwenden. Zur Entfernung von Flecken keine kratzenden Materialien (Bürsten, Stahlwolle, Messerklingen) einsetzen.

4.3 Desinfektionsempfehlung

Nach der Reinigung mit geeignetem Flächendesinfektionsmittel (getestet mit z. B. Incidin® Foam) nach Herstellerangaben im Sprüh-/Wischverfahren desinfizieren.

4.4 Lagerung und Aufbewahrung

Die Wandklappliege ist bei normalem Gebrauch